


乾熱滅菌確效試紙條(261018)

Dry Heat indicator Strips

(訂購編號261018) 乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat (淡藍色・變成褐色・)

250片/包

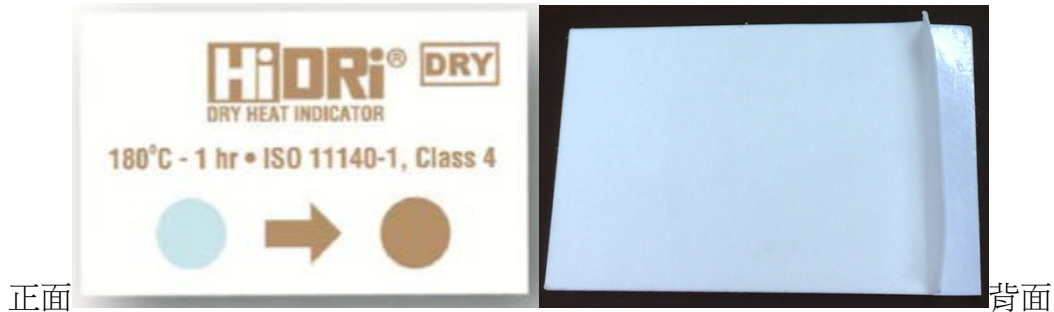

產品名稱：261018 乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat Indicator Strip

261018乾熱滅菌確效試紙條Dry Heat Indicator Strip印在一張自黏貼紙上，是設計用來供在180°C乾熱滅菌確效使用的。當遵照指示使用在180°C滅菌過程60分鐘，160°C滅菌過程120分鐘，這個試紙條在滅菌前及滅菌後提供一個明顯的指示確認。自黏貼紙試紙條背面的保護貼有劃分為兩部份。

滅菌前：先撕開保護貼小片的部分，供黏貼在要被滅菌的物體表面，滅菌後物體還是溫溫時比較容易取下自黏貼紙試紙條。

滅菌後：再撕掉自黏貼紙試紙條保護貼大片的的部分，將整片黏貼在滅菌記錄簿上留做記錄。

績效特性：在適當的乾熱條件下，試紙條改變顏色。

顏色改變：由淡藍色・變成褐色・。

顏色改變時間：在180°C的乾熱條件下60分鐘，160°C滅菌過程120分鐘。

尺寸：33mm 長 x 20mm 寬

包裝：250片/包

儲存：室溫 +15°C - 32°C，濕度 RH 35-65%，避光。

符合標準類別(Standards Classification):

ISO 11140-1:2014, Type 4

穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 2731-7727

傳 真：(02) 2731-8221

www.bge.com.tw

s111@bge.com.tw; s119@bge.com.tw

中華民國 108 年 01 月 22 日校譯